


*Saebo*ReachTM

سیبو ریتش

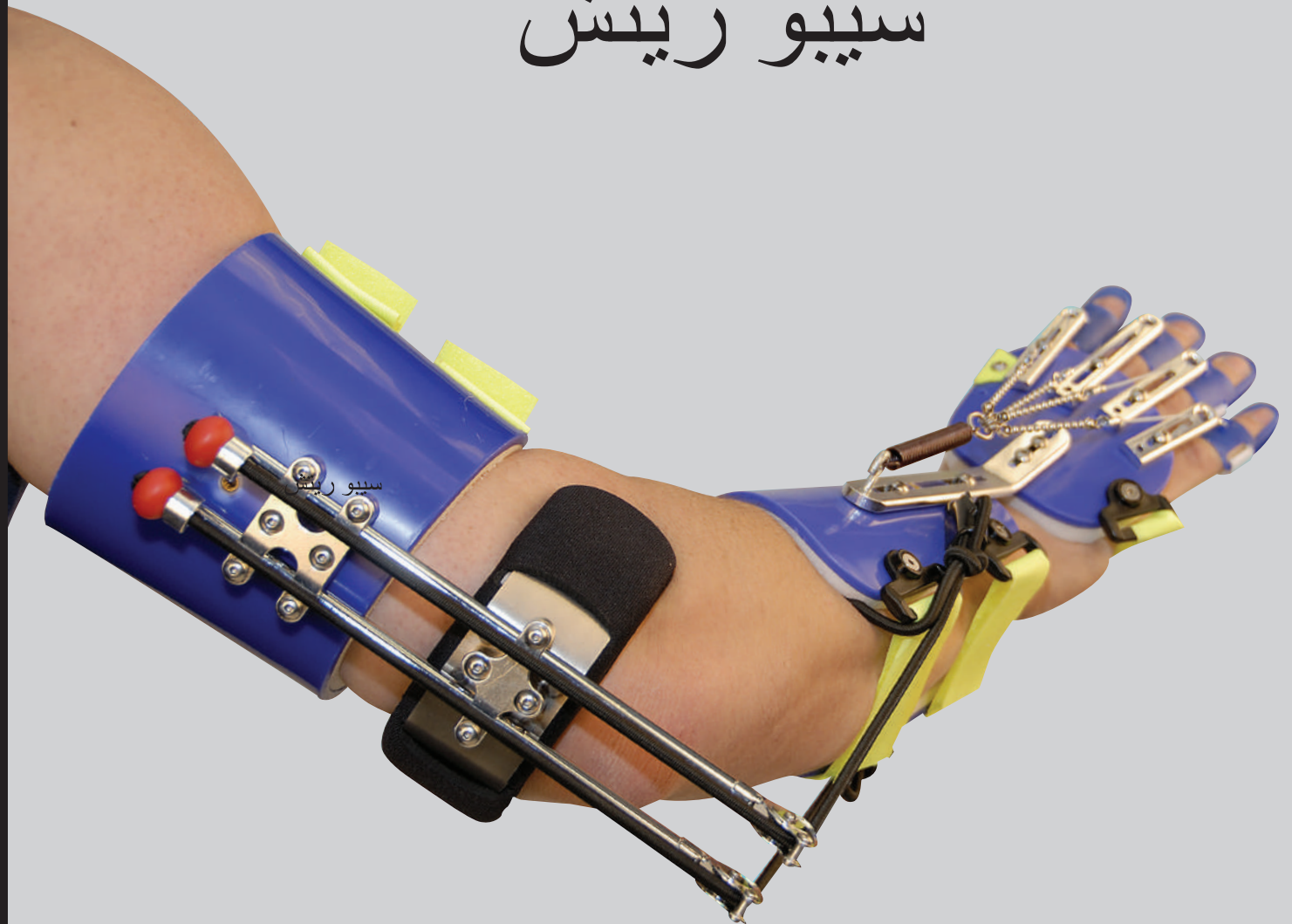

 **Saebo**
Leaders In Stroke Rehabilitation

المقدمة:

سيبو ريتش عبارة عن جبيرة او دعامة كوع, معصم, يد واصبع ديناميكية مصنعة حسب الطلب (EWHFO).
هو مدفوع الكوع والإصبع والإبهام في الانتشاء، والكابلات مدفوعة في التمديد.
تخدم الجبيرة ازدواجية الغرض:
دعم الكوع والمعصم واليد في وضع وظيفي بينما يسمح للشخص بدمج الطرف العلوي في الأنشطة الوظيفية.

فوائد:

- مصمم لدعم الأجزاء المعاقة عصبيا (الكوع والمعصم والعصبية اليد والإبهام والأصابع) في وضع وظيفي
- يساعد على منع وتصحيح تقلصات الكوع والمعصم اليد والإبهام والأصابع
- يحافظ ويحسن نطاق الحركة في الكوع والمعصم اليد والإبهام والأصابع
- يحسن القوة في الكوع والمعصم واليد والإبهام والأصابع
- يساعد في أداء أنشطة الإمساك والافلات الوظيفية باستخدام الذراع / اليد المصابة

التمركز:

عند ارتداء سيبو ريتش لتحديد الموقع، يجب على المريض زيادة وقت الارتداء تدريجيا. (يجب مراقبة هذا من قبل معالج مرخص / أخصائي رعاية صحية). هذا ينبغي أن يكون خلال ساعات الاستيقاظ، لا ينصح بذلك يتم ارتداء سيبو ريتش أثناء النوم.

الأنشطة الوظيفية:

نقترح ان يكون هناك جلستان يوميا لمدة 45 دقيقة تحتوي على أنشطة المسك والإفلات. استشير اخصائي سايبو لكي يساعدك على معرفة أفضل الطرق التي تكون مناسبة لاحتياجاتك الخاصة. بعد كل جلسة، يجب إزالة الجهاز ل 30 دقيقة على الأقل. يمكن أداء جلسات تزيد عن 45 دقيقة يوميا..

دواعي الاستعمال:

- سكتة دماغية
- إصابات الدماغ الصادمة (T.B.I).
- إصابة الحبل الشوكي غير كاملة
- الشلل الدماغي
- الأفراد الذين يعانون من شلل نصفي

موانع الاستعمال:

- تشوهات شديدة في الأصابع والإبهام

- أي نوع من أنواع التهاب المفاصل في الأصابع أو الإبهام
- اذا منع الحد من التقلصات الثابتة في الأصابع والإبهام والمعصم
- تورم شديد في الساعد و / أو اليد
- الجروح المفتوحة أو المناطق المصابة
- لم يتم تصميم سيبو ريتش للاستخدام على يد عادية لأن القطع المقاومة الديناميكية لم يتم معاييرها استيعاب النعمة العادية ولن يكون لها فائدة وظيفية.

الاحتياطات:

1. إذا واجهت أي ألم أثناء ارتداء أو استخدام سيبو ريتش ، توقف فوراً واتصل بالرعاية الصحية محترف قبل الاستئناف.
2. إذا كان التورم غير عادي ، وتغير لون الجلد ، وعدم الراحة ، أو يحدث خدر ، قم بإزالته على الفور واتصل بصحة الرعاية المهنية قبل استئناف.
3. تجنب ارتداء سيبو ريتش لأكثر من 45 دقيقة في الساعة الوقت أثناء دمجها وظيفيا.

4. يجب أن يتناسب سيبو ريتش بشكل مناسب ، ولكن بشكل مريح ، بدون التدخل في الدورة الدموية.

5. لا تدع الأطفال غير الخاضعين للرقابة يلعبون مع سيبو ريتش كـ هناك أجزاء صغيرة إذا تم إزالتها قد تسبب الاختناق إذا ابتلعت.

اعمال صيانة:

يجب تنظيف سيبو ريتش بقطعة قماش مبللة والسماح لها مجفف هواء. تجنب المواد الكيميائية / المواد الكاشطة للتنظيف والتي قد تتلف وخفض أداء سيبو ريتش. الإنجاز في سيبو ريتش:

من المهم أن يفهم المريض و / أو مقدم الرعاية كيفية القيام بذلك وضع بشكل صحيح على جبيرة سيبو ريتش. يجب أن يكون سيبو ريتش يتم ارتدائه في نفس الموقع في كل مرة لضمان الاداء الصحيح. فيما يلي الخطوات المقترحة للارتداء سيبو ريتش. إذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في تطبيق سيبو ريتش، يرجى الاتصال بطبيبك المعالج أو الاتصال بفنينا السريري فريق الدعم على 5433-284-888.

الخطوة رقم 1: تأكد من جميع الأشرطة الثلاثة (اثنان من الساعد ويد واحدة حزام) تم فكها.

الخطوة رقم 2: ضع إبهامك على العظم عند الرسغ (رأس الزندي) (رسم بياني 1). ضع على الساعد. تأكد من البعد حافة (السداة الأقرب إلى الرسغ) هي أعلى الصدفة العظم عند الرسغ (الشكل 2).

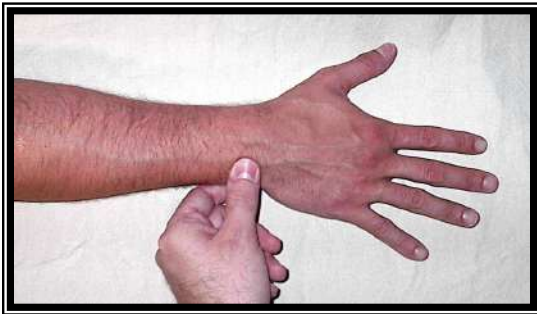


Fig #1


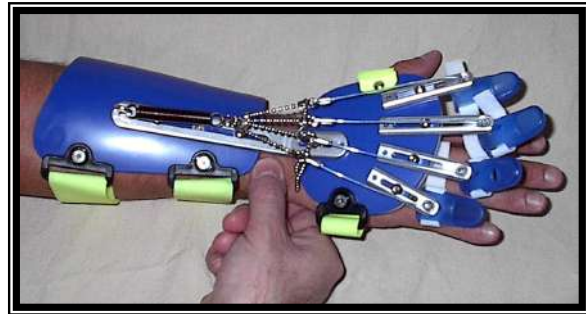



Fig #2

الخطوة رقم 3: بمجرد أن يكون غلاف الساعد في الموضع الصحيح،
ثبت حزامي الساعد. تأكد من أنها آمنة حتى
قشرة الساعد لا تنتقل إلى أسفل على عظم الرسغ
(الصورة 2).

الخطوة رقم 4: من أجل تطبيق حزام اليد ، ضع ظهر اليد
والأصابع ضد قطعة اليد. بمجرد وضعهم مع
يتم تثبيت حزام اليد في منتصف اليد

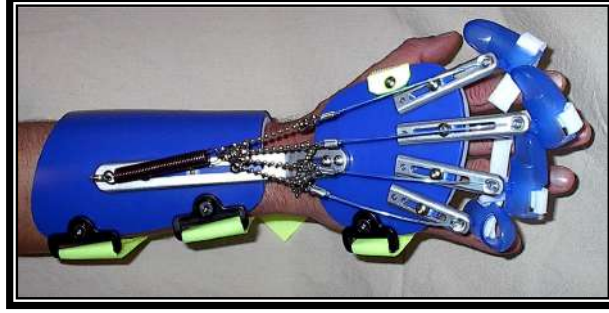

الخطوة رقم 5: عندما تكون الأشرطة الثلاثة محكمة ، قم بإزالة زنبرك الإصبع
من الخطاف على ممسك المعصم الموجود على الساعد
تحريك الخطاف نصف دورة بحيث تواجه الفتحة إلى الجانب.
قم بإزالة الزنبك مع ترك أغطية الخانات تسقط

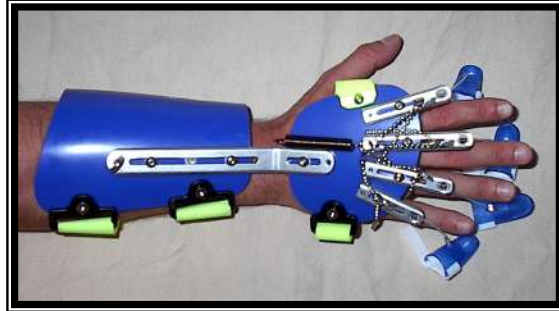

الخطوة رقم 6: بدء بإصبع السبابة والانتهاه بالخنصر
، حرك كل إصبع في غطاء الرقم المناسب. تأكد من أن
يأتي طرف الإصبع في نهاية غطاء الرقم، قد تكون هذه الخطوة صعبة لبعض
الأشخاص.

في البداية، قد يكون من الضروري فتح حزام الفيلكرو الأبيض
يحمل الغطاء الرقم بإحكام على الإصبع ولكن بعد ذلك، سيكون
ممكن انزلاق الاصبع في غطاء الرقم دون فتح
الأشرطة الفيلكرو. قم بتقليم أي طول زائد من أحزمة غطاء الرقم. (بك
يجب أن يقوم المعالج بقص هذه الأشرطة في العيادة



الخطوة رقم 7: بمجرد وضع القبعات الأربعة المكونة بأمان على الأصابع، قم بتقريب الاصابع
(الشكل رقم 3). أعد تثبيت
نابض الاصبع على خطاف العين على مسكة المعصم الموجود على
الساعد (الشكل رقم 4).
يجب توخي الحذر لتجنب سحب الأصابع لأعلى مع النابض
هذه الممارسة قد تفرط في الضغط على النابض أو تسحب الحلقة المنقسمة)
حلقة مستديرة في نهاية النابض).
نقترح عليك مد الأصابع والاحتفاظ بها في التمديد
وضعها على فخذك أو طاولة

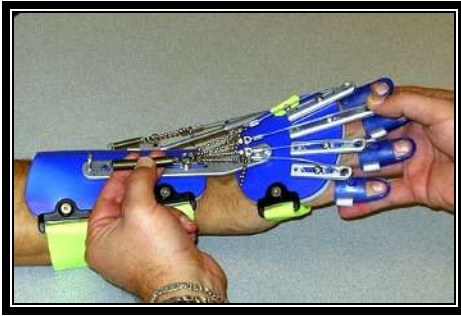


Fig #3


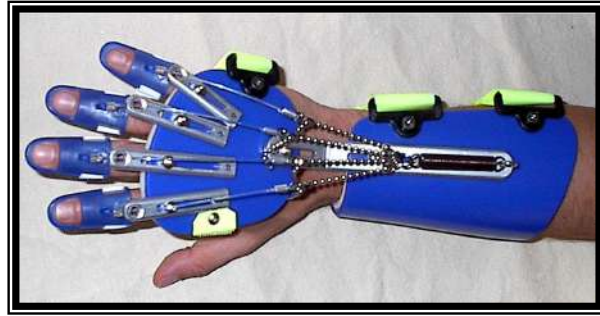


Fig #4

الخطوة رقم 8: لتطبيق غطاء الإبهام ، قم بفك زنبرك الإبهام
المعلق على الإبهام على الساعد. دع الغطاء الرقم
تعلق نحو الإبهام.




الخطوة # 9: حرك الإبهام في غطاء الرقم. تأكد من ان
الإبهام يصل الى نهاية (طرف) الجزء الداخلي من غطاء الرقم ولا
يمكن رؤية الفضاء.

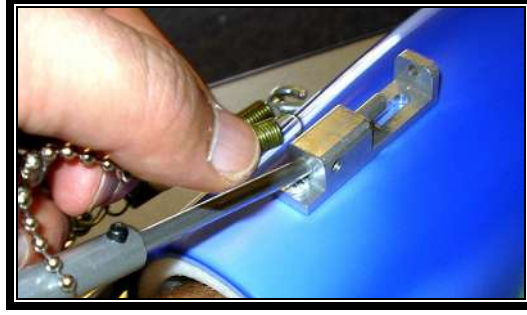


الخطوة رقم 10: بمجرد وضع غطاء رقم الإبهام بشكل آمن على الإبهام،
أعد تركيب نابض الإبهام على حامل الإبهام. كن حذرا حتى لا يمتد النابض بازدياد




الخطوة رقم 11: عند ارتداء المكون القريب (فوق الكوع الكفة) ، من المهم التأكد من وضع الجارتين الخارجيتين خلف العضد مباشرة. يجب أن تكون الفتحة على الجانب الأمامي من الذراع

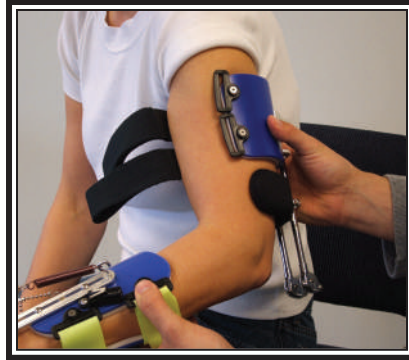

الخطوة رقم 12: بمجرد وضعها في الموضع الصحيح ، قم بتثبيت كلا الحزامين.

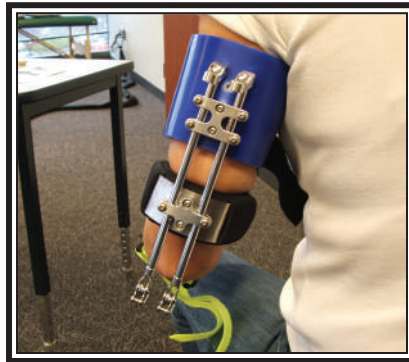

الخطوة # 13: قم بتوصيل حبل التوتر. يتم تحقيق ذلك من خلال إدخال أسلاك الشد من خلال المرباط المرفقة. اسحب ال أسلاك التوتر من خلال المرباط حتى ضربت علامات التوتر على الظهر المرباط. اسحب الحبال للأعلى والخلف للتثبيت.

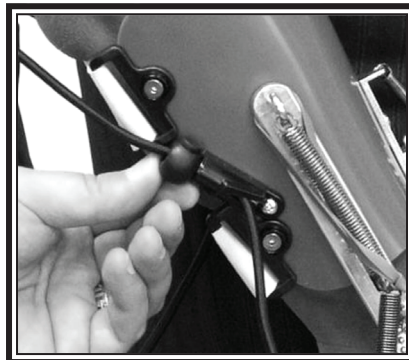

الخطوة رقم 14: يمكنك إعادة لف الأطراف الحرة لأسلاك التوتر مرة أخرى حول أنفسهم لإبعادهم عن الطريق.



-
- رعاية وتنظيف مجموعة أدوات سيبو فلكس و سيبو ريتش من كيت ستايل
 - يتم تصنيع أجهزة بأسلوب الطقم بحيث يمكن إزالة بطانات الرغوة واستبدالها ببطانات الرغوة البديلة المتوفرة في سيبو
 - عدة. أحزمة بديلة للأغطية والقطع اليدوية والساعد و اغطية مدرجة أيضا.
 - يمكن تنظيف ما تبقى من قطع / قطع بنفس الطريقة
 - بنفس محاليل التنظيف المستخدمة لمعدات ولوازم إعادة التأهيل الأخرى مثل السابق.
 - رش أو تطبيق محلول على قطعة قماش نظيفة ومسح.
 - إذا تم استخدام الجهاز عدة مرات فقط ، يتم إغلاق البطانة الرغوية ، يمكن إعادة استخدامها بعد المسح والتنظيف مع استخدام نفسه المحلول.
 - رعاية وتنظيف سيبو فلكس و سيبو ريتش ملفقة مخصصة
 - استخدام سائل مطهر أو بخاخ آخر في المستشفى
 - يوضع على قطعة قماش نظيفة ويمسح.
 - الحشو الرغوي عبارة عن خلية مغلقة وغير ماصة ويمكن مسحه أيضا مع محلول تنظيف مطهر وكذلك باستخدام قطعة قماش نظيفة



www.saebo.com
888-284-5433



With Saebo . . . There Is No Plateau In Sight®