



طقم خطاف الجفن



(2) خطاف العيينة

(2) مسامير مقاس 16/5 بوصة

(2) 1/4 "براغي

(2) 3/8 براغي

(2) غسالات

www.saebo.com/saebostep

1

حدد طول المسامير المناسب لحذائك.



2

أدخل المسامير والغسالة المناسبة في العيينة الموجودة في حذائك.



3

ثبّت رأس البرغي بإصبعك أثناء لف خطاف العيينة بإحكام بيد أخرى.



4

ضع الطرف المفتوح لخطاف العيينة في اتجاه مقدمة الحذاء.



5

قم بتوصيل الحبل الأمامي بخطاف العيينة كما هو موضح.



6

قم بلف القرص عن طريق تدويره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم إحكام السلك الأمامي وتحصل على الرفع والزاوية المرغوبة.



Saebo, Inc.

2459 Wilkinson Blvd., Suite 120-B
Charlotte, NC 28208

888-942-5751

sales@saebo.com

www.saebo.com



European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd.
info@europeandevicesolutions.co.uk
www.europeandevicesolutions.co.uk

Australian Sponsor:
Ausmedic Australia Pty Ltd
Unit 3, 3 Basalt Road Pemulwuy NSW
2145 1300 473 422
Performhealth.com.au



