



KIT ATTACCHI AD OCCHIELLO



- (2) Attacchi ad occhio
- (2) Viti da 5/16"
- (2) Viti da 1/4"
- (2) Viti da 3/8"
- (2) Rondelle

www.saebo.com/saebostep

1

Utilizzare le viti di lunghezza adeguata per la propria scarpa.



2

Inserire nell'occhiello della scarpa una vite adeguata corredata di rondella.



3

Tenere ferma la testa della vite con il dito mentre si avvita saldamente l'attacco ad occhio con l'altra mano.



4

Posizionare l'estremità aperta dell'attacco a occhio avendo cura di rivolgerla verso la punta della scarpa.



5

Fissare il cordino anteriore agli attacchi ad occhio, come illustrato.



6

Ruotare la manopola in senso orario in modo da tendere il cordino anteriore e da ottenere il supporto e l'angolazione desiderati.



Saebo, Inc.

2459 Wilkinson Blvd., Suite 120-B
Charlotte, NC 28208

888-942-5751
sales@saebo.com
www.saebo.com



Rappresentante Europeo:
European Healthcare and Device Solutions Ltd
Stratton House
Bishopstown Road
Cork
T12 Y9TC
Ireland

Importatore e distributore esclusivo per l'Italia:
Officine Ortopediche Rizzoli srl Via Cesare
Battisti 44
40054 Budrio (Bologna)

Rev. 03/2022

