




SaeboStep


Istruzioni

Contenuto della confezione

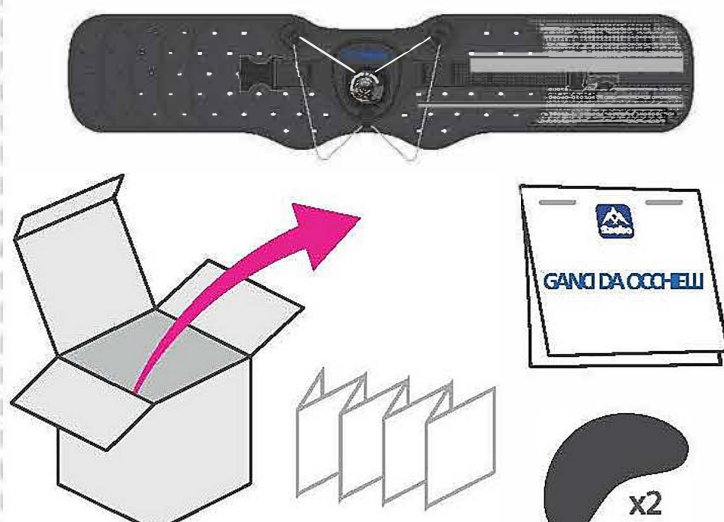

1


Parti del Tutore

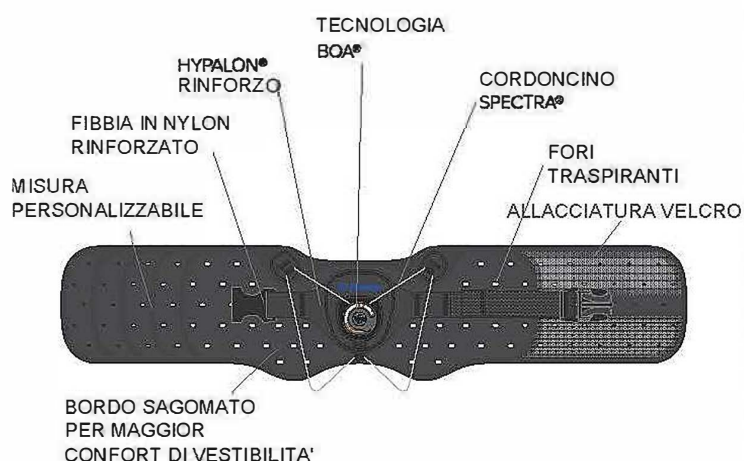

2

Posizionate il Tutore

- Posizionate il Boa® al centro rispetto al piede o alla scarpa
- Avvolgete il Tutore intorno alla caviglia per controllare la misura

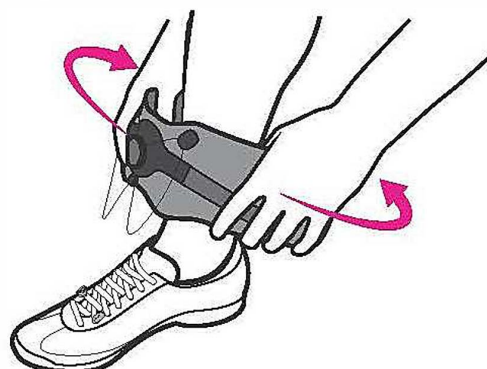

3

Tagliate il Tutore


- Se necessario tagliare il Tutore
(Nota: assicuratevi di non tagliare le zone cucite)



4

Allacciate il velcro


- Riposizionate il Boa® al centro rispetto al piede o alla scarpa
- Avvolgete il Tutore **ben stretto** intorno alla caviglia
- Posizionate contro la gamba prima la parte sinistra poi la destra per fissare il velcro

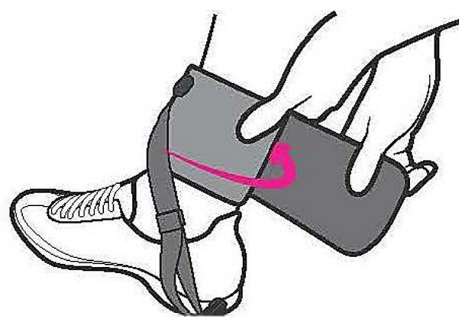

5

Allacciate la fibbia


- Una volta fissato il velcro, allacciate la fibbia
- Regolate la lunghezza del cinturino secondo necessità

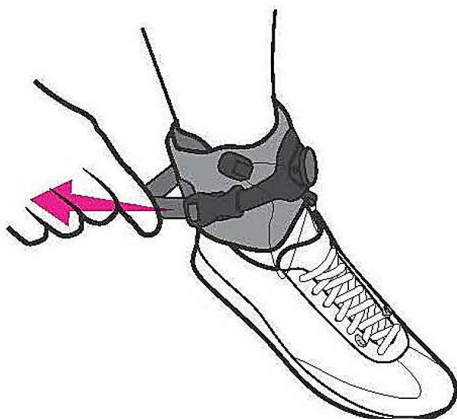

6

Montate i ganci da occhielli

- Per un corretto montaggio ed utilizzo fare riferimento alle relative istruzioni presenti nell'imballo (ganci da occhielli)

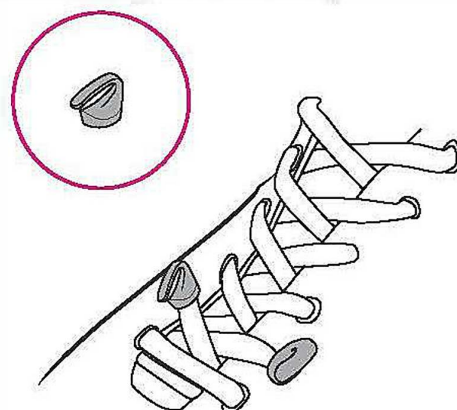

7

Sganciate il BOA®


- Tirate in fuori la parte anteriore del Boa®



8

Agganciate il cordoncino


- Con il Boa® in fuori, prendete in mano il cordoncino spectra e tiratelo verso i ganci da occhielli
- Infilate il cordoncino nelle aperture dei ganci

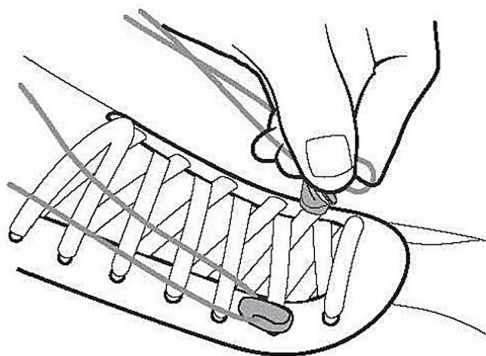

9

Girate il BOA®

- Spingete il Boa® in dentro finché non fa click
- Giratelo in senso orario fino a tendere il cordoncino e ottenere il sollevamento e l'angolazione desiderati

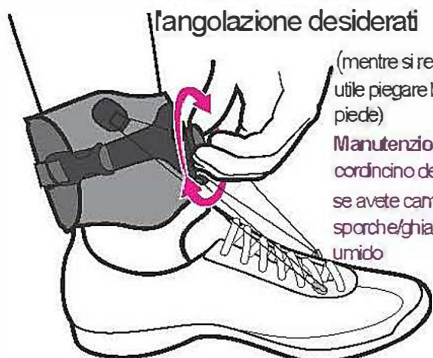

(mentre si regola la tensione può essere utile piegare lo stinco verso la punta del piede)

Manutenzione: per evitare che il cordoncino del Boa® si usuri anzitempo, se avete camminato su superfici sporche/ghiaiose, pulitelo con un panno umido

10

Regolate secondo necessità

- Se avvertite pressione in qualsiasi punto, regolate la larghezza e l'altezza del tutore sulla caviglia
- Se necessario, per un maggiore comfort, inserite i cuscinetti inclusi



Visitate il nostro sito per guardare i video con le istruzioni, comprese quelle per fare gli occhielli, praticamente su qualsiasi tipo di scarpa.

www.saebo.com/saebostep

Consultate il vostro medico sulla vostra patologia e sull'uso di questo tutore.

Contattare il Distributore:

Officine Ortopediche Rizzoli Srl

Sede Legale Via Massimo D'Azeglio 48 40123 Bologna Sede Operativa Via Cesare Battisti 44 40054 Budrio (BO) Tel. +39 051 6980711

Fabbricante:

Saebo, Inc.

2459 Wilkinson Blvd

Suite 120

Charlotte, NC 28208

Tel: 888.284.5433

www.saebo.com

Rappresentante Europeo

EUROPEAN HEALTHCARE AND DEVICE

SOLUTIONS(IRELAND) LIMITED

STRATTON HOUSE

BISHOPSTOWN ROAD

CORK

T12Y9TC

IRELAND

Hypalon® è un marchio registrato di **E.I. du Pont de Nemours and Company**. **Boa®** è un marchio registrato di **Boa Technology Inc.** **Spectra®** è un marchio registrato di **Honeywell International Inc.**