



SaeboStep
Istruzioni




DEL DISPOSITIVO

- (1) Tutore
- (2) Attacchi ad occhiello
- (2) Viti da 5/16"
- (2) Viti da 1/4"
- (2) Viti da 3/8"
- (2) Rondelle



COMPONENTI DEL TUTORE

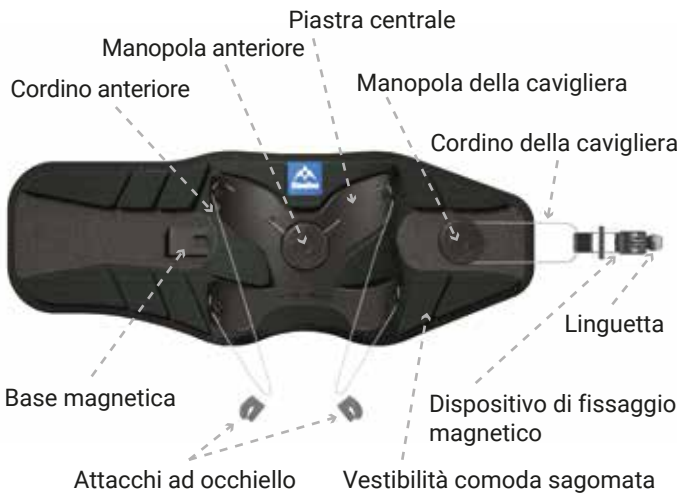

1 APERTURA DELLA CAVIGLIERA



Per allentare il cordino della cavigliera, ruotare in senso antiorario la manopola della stessa.



Afferrare la linguetta ed esercitare una trazione finché il dispositivo di fissaggio magnetico non si separa dalla base..

2 POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO



Sistemare il SaeboStep sulla caviglia in modo che la manopola anteriore sia centrata rispetto alla scarpa e che il logo Saebo blu sia posizionato verso l'alto.

3 FISSAGGIO DELLA CAVIGLIERA



Afferrare la linguetta fissata all'estremità del cordino della cavigliera e agganciarla alla base magnetica. All'avvenuto fissaggio, si avverte un clic.



Ruotare la manopola della cavigliera in senso orario finché quest'ultima non si è perfettamente adattata.

FISSAGGIO DELLA CAVIGLIERA (SEGUITO)



Nota 1: Assicurarsi che il cordino della cavigliera non sia attorcigliato.



Nota 2: L'estremità della cavigliera recante la manopola anteriore deve sovrapporsi all'estremità della cavigliera recante la base magnetica.

4 FISSAGGIO DEGLI ATTACCHI AD OCCHIELLO



Inserire nell'occhiello della scarpa una vite adeguata corredata di rondella.



Tenere ferma la testa della vite con il dito mentre si avvitano saldamente l'attacco ad occhiello con l'altra mano. Posizionare l'estremità aperta dell'attacco ad occhiello avendo cura che di rivolgerla verso la punta della scarpa.

5 ALLENTAMENTO DEL CORDINO ANTERIORE



Ruotare la manopola anteriore in senso antiorario.



Tirare i cavetti sinistro e destro, se possibile, contemporaneamente, esercitando una trazione verso il basso in direzione della scarpa.

6 FISSAGGIO DEL CORDINO AGLI ATTACCHI AD OCCHIELLO



Far passare il cordino nell'estremità aperta degli attacchi ad occhiello.

7 TENSIONAMENTO DEL CORDINO ANTERIORE



Ruotate la manopola in senso orario in modo da tendere il cordino anteriore e da ottenere il supporto e l'angolazione desiderati.

USANDO UNA MANO SOLA



- 1 Per facilitare l'operazione, ruotare la cavigliera in modo da portare il dispositivo di fissaggio magnetico e la manopola della cavigliera verso il lato anteriore della caviglia.
- 2 Agganciare il dispositivo di fissaggio magnetico alla base.
- 3 Tendere il cordino della cavigliera ruotando in senso orario la manopola della cavigliera.

VI INVITIAMO A GUARDARE I NOSTRI VIDEO

Nel nostro sito web potrete trovare vari video esplicativi, incluse le istruzioni per praticare occhielli ex novo in calzature di qualsiasi tipologia.

www.saebo.com/saebostep

Consultare il medico per informazioni relative al proprio stato di salute e all'uso di questo tutore.



Saebo, Inc.
2459 Wilkinson Blvd., Suite 120-B
Charlotte, NC 28208
888-942-5751
sales@saebo.com
www.saebo.com



Rappresentante Europeo:
European Healthcare and Device Solutions Ltd
Stratton House
Bishopstown Road
Cork
T12 Y9TC
Ireland



rev 01 del 18/10/2021