



طقم استبدال السلك



- (1) مفتاح أليين
- (1) لوحة الدعامة
- (4) مسامير

www.saebo.com/saebostep

1

باستخدام مفتاح أليين المرفق ،
قم بفك وإزالة جميع المسامير الأربعة
من لوحة الدعامة الموجودة.



2

قم بإزالة وتجاهل لوحة الدعامة الموجودة.



4

قم بتأمين وشد لوحة الدعامة الجديدة
باستخدام مفتاح ربط ومسامير أليين.



3

تتم ذابة ولوحة Brace الجديدة
بحيث تتوافق الثقوب مع
3 Saebo Step Cuff.



Saebo, Inc.

2459 Wilkinson Blvd., Suite 120-B
Charlotte, NC 28208

888-942-5751
sales@saebo.com
www.saebo.com



European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd.
info@europeandevicesolutions.co.uk
www.europeandevicesolutions.co.uk

Australian Sponsor:
Ausmedic Australia Pty Ltd
Unit 3, 3 Basalt Road Pemulwuy NSW
2145 1300 473 422
Performhealth.com.au



