



## KIT DI SOSTITUZIONE DEL CORDINO



- (1) Chiave a brugola
- (1) Piastra centrale
- (4) Viti

[www.saebo.com/saebostep](http://www.saebo.com/saebostep)

1

Servendosi della chiave a brugola in dotazione, allentare e rimuovere tutte e 4 le viti dalla piastra centrale esistente.



2

Rimuovere ed eliminare la piastra centrale esistente.



3

Sistemare in posizione la nuova piastra centrale avendo cura di far combaciare i fori con quelli presenti sul tutore **SaeboStep**.



[www.saebo.com/saebostep](http://www.saebo.com/saebostep)

4

Fissare saldamente la nuova piastra centrale utilizzando la chiave a brugola e le viti in dotazione.



 **Saebo, Inc.**

2459 Wilkinson Blvd., Suite 120-B  
Charlotte, NC 28208

888-942-5751  
[sales@saebo.com](mailto:sales@saebo.com)  
[www.saebo.com](http://www.saebo.com)

**EC REP**

Rappresentante Europeo:  
European Healthcare and Device Solutions Ltd  
Stratton House  
Bishopstown Road  
Cork  
T12 Y9TC  
Ireland

rev 01 del 18/10/2021